

JedX®

M E D C A R E



Hengityssuojain FFP2 NR
Mukava nenäpidike

Taitettava

Ohje 8-2020

Andningsskydd FFP2 NR
Med en bekväm näsklämma
Vikbar

Instruktion 8-2020

Tuotenimi | Product namn: JedX FFP2 NR. **Pakkausseloste:** Taitettava 15,5 x 10,5 x 0,5 cm, 1kpl / pussi | **Specification:** Vikbar 15,5 x 10,5 x 0,5 cm, 1st / påse. **Valmistusmateriaali | Material:** Spunbond NW, Meltblown NW. **Suodatus:** kiinteät ja nestemäiset hiukkaset; öljy, pöly, siitepöly, virus, bakteeri ja pisara. | **Filtering:** fasta och flytande partiklar; olje, damm, pollen, virus, bakteriell och droppar. **Suodatusstandardi | Filteringstandard:** EN149:2001+A1:2009, FFP2 min.94%. Henkilösuojainasetuksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy www.jedxmedcare.fi | Försäkran om överensstämmelse i enlighet med personskyddsförordningen kan hittas på www.jedxmedcare.fi.



Käyttöohje (FI) | Instruktioner (SE)

1. Pese kädet. Avaa suojain, aseta nenäpidike nenälle. | Tvätta händerna. Öppna masken, ställ näsklämmen på näsan.
2. Vedä suojain poskillesi ja vedä kuminauhat korvien ympäri. | Dra masken på dina kinder och dra de elastiska banden runt öronen.
3. Muotoile nenäpidike nenäsi muotoon. | Justera näsklämmen så att den passar näsan.
4. Purista etusormilla nenäpidike siten että ilmavuoto estyy naamarin reunoilta. | Tryck på näsklämma med båda pekfingerarna så att masken tar formen för att förhindrar luftläckage.

Huomioitavaa (FI) | Obs (SE)

1. Aseta suojain kasvoillesi kuvan ohjeiden mukaisesti ja tarkista hengittämällä syvään, että suojain ei vuoda reunoilta. Jos suojain vuotaa aseta suojain paremmin kasvoillesi. Jos et saa suojainta istumaan kasvoillasi, et pysty suojautumaan tällä suojaimeilla ilman epäpuhtauksilta. | Placera masken enligt instruktionerna på bilden och kontrollera att masken är i enlighet med ansiktet. 2. Älä käytä rikkiinäästä suojainta, vaihda aina uusi suojain. | Använd inte en trasig mask, byt ut till en ny mask. 3. Kun käytät suojainta, pysy poissa avotulen läheältä suojaimen palamisen tai muotoutumisen estämiseksi. | När du bär en mask, håll dig borta från eld för att undvika materialförbränning eller maskdeformation.
4. Mikäli joudut poistamaan suojaimen käytön aikana, vältä kosketusta suojaimen ulkopinnan kanssa tartuntojen ehkäisemiseksi. | Om masken behövs av under användning, se till att du inte rör masken på utsidan för att förhindra infektioner. 5. Suojain on kertakäyttöinen ja sitä ei voi uudelleen käyttää. | Detta är en engångsmask, använd inte återanvändbar. 6. Kun poistat suojaimen, taittele se ja sido kiinnityskuminauhoilla. | När du kastar masken, vik den och bind ihop med elastiska öronbanden.

Varoitus (FI) | Varning (SE) Suojain suodattaa ohjeen mukaiset epäpuhtaudet. Tuote ei suoja kaasuilta, höyryiltä ja hapenpuutteelta. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa sairauksia tai jopa kuoleman. | Masken kan filtrera vissa föroreningar. Produkten skyddar inte gaser, ångor och brist på syre. Inkorrekt användning kan orsaka sjukdom eller till och med dödsfall. Maksimi käyttöaika 8 h. | Maximal användningstid 8 h.

Säilyvyys oikein säilytettynä 5 v tuotantopäivästä. | Hållbarhet 5 år från produktiondagen.

Säilytys hyvässä ilmanvaihdossa, kuivassa (RH 0...80 %, -30...+40 °C), auringonvalolta suojattuna. | Lagring i väl ventilerad, torr (RH 0...80 %, -30...+40 °C), skyddad från solljus.

Viimeinen käyttöpäivä: Katso pakkaus. | **Sista förbrukningsdag:** Se förpackningen.



Valmistaja | Tillverkare

JedX Medcare

Köysikuja 1

01640 Vantaa

FINLAND

+358 20 741 5180

www.jedxmedcare.fi

CE 2841
EN149:2001+A1:2009

Ilmoitettu laitos | Anmält organ: 2841

MNA LABORATORIES IND. TRADE.CO.LTD

Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad.NO:21

Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08