

JedX[®]

M E D C A R E

Hengityssuojain FFP3 NR
Mukava kiinnityskoukku
Taitettava
Ohje 9-2020



Andningsskydd FFP3 NR
Med en bekväm fastsättningskrok
Vikbar
Instruktion 9-2020

Tuotenimi | Product namn: JedX FFP3 NR. **Pakkausseloste:** Taitettava 15,5 x 10,5 x 0,5 cm, 1kpl / pussi | **Specification:** Vikbar 15,5 x 10,5 x 0,5 cm, 1st / påse. **Valmistusmateriaali | Material:** Spunbond NW, Meltblown NW. **Suodatus:** kiinteät ja nestemäiset hiukkasat; öljy, pöly, siitepöly, virus, bakteeri ja pisara. | **Filtering:** fasta och flytande partiklar; olje, damm, pollen, virus, bakteriell och droppar. **Suodatusstandardi: | Filteringsstandard:** EN149:2001+A1:2009, FFP3 min.99%. Henkilösuojainasetuksen mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy www.jedxmedcare.fi | Försäkran om överensstämmelse i enlighet med personskyddförordningen kan hittas på www.jedxmedcare.fi.

Huomioitavaa (FI) | Obs (SE) 1. Aseta suojain kasvoillesi kuvan ohjeiden mukaisesti ja tarkista hengittämällä syvään, että suojain ei vuoda reunoilta. Jos suojain vuotaa aseta suojain paremmin kasvoillesi. Jos et saa suojainta istumaan kasvoillasi, et pysty suojautumaan tällä suojaimella ilman epäpuhtauksilta. | Placera masken enligt instruktionerna på bilden och kontrollera att masken är i enlighet med ansiktet. **2.** Älä käytä rikkiäistä suojainta, vaihda aina uusi suojain. | Använd inte en trasig mask, byt ut till en ny mask. **3.** Kun käytät suojainta, pysy poissa avotulen läheltä suojaimen palamisen tai muotoutumisen estämiseksi. | När du bär en mask, håll dig borta från eld för att undvika materialförbränning eller maskdeformation. **4.** Mikäli joudut poistamaan suojaimen käytön aikana, vältä kosketusta suojaimen ulkopinnan kanssa tartuntojen ehkäisemiseksi. | Om masken behövs at av under användning, se till att du inte rör masken på utsidan för att förhindra infektioner. **5.** Suojain on kertakäyttöinen ja sitä ei voi uudelleen käyttää. | Detta är en engångsmask, använd inte återanvändbar. **6.** Kun poistat suojaimen, taittele se ja sido kiinnityskuminauhoilla. | När du kastar masken, vik den och bind ihop med elastiska örönbanden.

Varoitus (FI) | Varning (SE) Suojain suodattaa ohjeen mukaiset epäpuhtaudet. Tuote ei suojaakaan kaasulta, höyryiltä ja hapenpuutteelta. Vääränlainen käyttö voi aiheuttaa sairauksia tai jopa kuoleman. | Masken kan filtrera vissa föroreningar. Produkten skyddar inte gaser, ångor och brist på syre. Inkorrekt användning kan orsaka sjukdom eller till och med dödsfall. Maksimi käyttöaika 8 h. | Maximal användningstid 8 h. Säilyvyys oikein säilytettynä 5 v tuotantopäivästä. | Hållbarhet 5 år från produktionsdagen. Säilytys hyvässä ilmanvaihdossa, kuivassa (RH 0...80 %, -30...+40 °C), auringonvalolta suojattuna. | Lagring i väl ventilerad, torr (RH 0...80 %, -30...+40 °C), skyddad från solljus.

Viimeinen käyttöpäivä: Katso pakkaus. | **Sista förbrukningsdag:** Se förpackningen.

Käyttöohje (FI) | Instruktioner (SE)

1. Pese kädet. Avaa suojain, aseta nenäpidike nenälle. | Tvätta händerna. Öppna masken, ställ näsklämmen på näsan. **2.** Vedä suojain poskillesi ja vedä kuminauhat korvien ympäri. | Dra masken på dina kinder och dra de elastiska banden runt öronen. **3.** Muotoile nenäpidike nenäsi muotoon | Justera näsklämmen så att den passar näsan. **4.** Purista etusormillanäpidike siten että ilmavuoto estyy naamarin reunoilta. | Tryck på näsklämmen med båda pekfingerarna så att maskentar formen för att förhindrar luftläckage. **5.** Kiinnitä kuminauhat pääsi taakse muovikoukulla ja säädä ne ja hengityssuojain hyvin, siten, että suojain asettuu kasvoillesi hyvin. | Fäst elastiska banden på baksidan av huvudet med en plastikork och justera dem och andningsskyddet väl, så att skyddet passar bra i ditt ansikte.



CE 2841
EN149:2001+A1:2009

Valmistaja | Tillverkare

JedX Medcare
Köysikuja 1, 01640 Vantaa FINLAND
+358 20 741 5180 | jedxmedcare.fi
Ilmoitettu laitos | Anmält organ 2841
MNA LABORATORIES IND. TRADE CO. LTD.
Küçükbakkalköy Mah. Yenidoğan Cad. No:21
Ataşehir/İstanbul | +90 216 574 07 08